

Brugsanvisning for talende vækkeur, TalkTech, model YL – 903

Instruktion

Vækkeuret har dansk tale i alle funktioner samt et display som viser tid og øvrige funktioner. Følgende funktioner findes: tidsangivelse, alarm, annoncering af time samt termometer.

Orientering om vækkeurets udformning og håndtering

Uret har en rektangulær front med stærkt afrundede sider. Dybden er udlagt som æggeformet. I bunden findes en lomme til batterierne. Ovenpå sidder en lang tangent – taleknappen, når man trykker på den angives den aktuelle tid.

På fronten sidder et højtalgitter til højre. Til venstre længst oppe findes displayet, og under den findes en række med fire knapper.

- Knappen længst til venstre er mærket MODE, den anvendes ved indstilling af samtlige funktioner.
- Næste knap i front hedder RESET. Den anvendes til at nulstille indstillede funktioner og tider. Ved leveringen er uret fabriksindstillet til kl. (12.00). Brug altid en spids genstand for at trykke på RESET.
- Den tredje knap er mærket SET, og den anvendes sammen med MODE for at indstille.
- Knappen længst til højre er en skyderegulering til regulering af styrken i talen, skyder man reguleringen opad bliver styrken højere, kører man reguleringen nedad bliver styrken lavere.

Monteringen af batterier

Dækslet på undersiden åbnes ved at trykke på den ophøjede pil og træk derefter dækslet væk fra fronten. Monter to batterier (type R6) med minuspolen som er den flade ende af batteriet, som skal lægges mod fjederen, de placeres i deres respektive rum. Efter indlæggelse af batterierne skydes dækslet ind i sine spor, så det sætter sig fast ved et klik.

Indstillinger

Tag fat i uret med begge hænder med front mod dig selv, placer venstre tommeltot på knappen MODE og højre tommeltot på knappen SET. Nu kan du ved at veksle mellem venstre og højre skifte til de indstillinger du ønsker. Tryk hver gang på en bestemt måde. Holdes SET-knappen nedtrykket, stiger uret automatisk i høj takt. Under indstillingen går man gennem en hel sekvens (menu) af indstillingsmuligheder. Vil man tilbage til en bestemt indstilling er det bare om at tage en ny "runde" i menuen. Man behøver ikke at stoppe for hver gang i menuen når man skal lave en indstilling. Efter du har indstillet uret, forlader du uret som efter 10 sekunder går til sit startleje.

Vi vil foreslå at du begynder med at indstille til normal tid.

Tid

Tryk med venstre tommeltot (MODE) et antal gange til uret siger "stil time". Tryk nu med højre (SET) et antal gange indtil du har nået den rigtige tid.

Tryk derefter igen med venstre tommeltot til uret siger "stil minut". Tryk derefter nogle gange til du har ramt dit minuttal.

Nu har du gjort grundindstillingen, og du kan aflæse tiden når du vil, det gør du ved at trykke på taleknappen (den lange tangent på toppen).

Hvis du vil anvende alarmfunktion eller timerrapportering, må du indstille disse på samme vis.

Indstilling af alarm (vækkefunktion)

Tryk til venstre til uret siger "stil alarm". Tryk derefter til højre til uret siger "til" eller "fra" samt angiver den indstillede alarmtid.

Timerapportering (automatisk timemelding hver time)

Tryk til venstre til uret siger "stil timerapport" Tryk derefter til højre til uret angiver "timemelding til" eller "timemelding fra" af hvilket du ønsker

Stil alarm

Tryk til venstre til uret siger "stil alarmtimer". Tryk derefter til højre til uret angiver ønsket time.

Tryk til venstre til uret siger "stil alarmminutter". Tryk derefter til højre til uret angiver ønsket minut.

Man kan altid kontrollere hvilken alarmtid som er indstillet ved at trykke på knappen SET.

Ved indstillet tid gives alarm med signal og uret meddeler tiden i ca. 1 minut. Hvis alarmen lukkes ved tryk på taleknappen, kommer et fornyet alarm efter 10 minutter og gentages derefter hvert tiende minut.

Vil man stoppe alarmen helt skal man trykke på knappen MODE.

Automatisk tidsindstilling

OBS! Om taleknappen holdes nede i 10 sekunder, stilles uret om til klokken 12.00. Hvis man ønsker at vente på 12 slag (kan man aflytte radioen) og når uret er 12.00 trykker man på taleknappen i 10 sekunder og da stilles uret automatisk til 12.00. Denne manøvre påvirker ikke indstillet alarmtid, alarmfunktion eller timerapporteringsfunktionen.

Termometer

Termometeret fungerer ved at holde tangenten til tids melding nede. Forst kommer tids melding derefter annonceres temperaturen. Angiver ny temperatur hvert 10 minut.

Rengøring af vækkeuret

Uret kan efter behov rengøres med en let opvredet klud

Batterier

Uret drives ved hjælp af to batterier (type AA, R6 eller UM-3). Brug helst batterier af alkaline typen, de giver det bedste resultat.

Husk at brugte batterier skal afleveres i de respektive beholdere for brugte batterier.

Service og support

I første omgang bør du henvende dig i den butik, hvor uret er købt, der herefter vil foretage det fornødne.

Butik KIK
Gåsebæksvej 7
2500 Valby
Tlf. 36 46 19 60
Fax. 36 46 19 25
www.butikkik.dk
butikkik@mail.tele.dk